

科技创新谋发展 ■ 诚信质量创品牌



(联机用) 血液透析B干粉



产品型号	碳酸氢钠含量(克)	默认适用机型
KC2003F1	660	费森尤斯机型
KC2003F2	700	
KC2003F3	1200	
KC2003G2	700	金宝、贝朗等机型
KC2003G3	1200	

金宝血透机使用(联机用)血液透析B干粉时,须配套使用本公司生产的KC200101型A干粉或KC200401型A浓缩液。

每支(联机用)血液透析B干粉可供血液透析时间

碳酸氢钠含量(B干粉)	有效用量	可供血液透析时间
660g	610g	6h55min
700g	650g	7h22min
1200g	1150g	13h2min

每小时 NaHCO_3 使用量: $35\text{mmol/L} \times 30\text{L} \times 84\text{g/mol}$ (分子量) = 88.2g

透析液浓度: 35mmol/L, 透析液流速: 500ml/min; 为保证透析液达到预期浓度, 每支产品应至少保留 50g 底量

康盛生物(联机用)血液透析B干粉的优点:



浓度精准

- 均匀的原料粒径和特殊的晶体结构, 溶解更充分
- 提供稳定的饱和 NaHCO_3 溶液, 有效纠正酸中毒



安全性高

- 采用质量可靠的过滤装置, 不漏粉、不堵塞设备
- 现配现用, 避免微生物生长, 减少 HCO_3^- 离子分解



工艺先进

- 采用先进封口工艺, 避免拉丝、过焊黑点
- 有效降低封口裂开风险, 有效期长达 24 个月



应用便捷

- 透明包装材质, 便于实时检视
- 小包装、重量轻, 方便运输贮存

血液透析干粉



产品型号		KC200101	KC200102	KC200104
A干粉	一人份	1258g	1022g	1313g
	五人份	6290g	5110g	6565g
	十人份	12580g	10220g	13130g
B干粉	一人份	540g	845g	500g
	五人份	2700g	4225g	2500g
	十人份	5400g	8450g	5000g
A 浓缩液 : B 浓缩液 : 水 稀释混合比例		1 : 1.23 : 32.77	1 : 1.83 : 34.00	1 : 2.10 : 34.00

⊙ 血透机可设定不同的“A 浓缩液 : B 浓缩液 : 水”稀释混合比例，在选择血液透析干粉时，应根据血透机设定的比例选择产品型号。

血液透析浓缩液



产品型号	KC200401		KC200401-01	KC200402		KC200403		KC200405	
	A浓缩液	B浓缩液	A浓缩液 (Ca 1.25)	A浓缩液	B浓缩液	A浓缩液	B浓缩液	A浓缩液	B浓缩液
包装规格	5L/6L/10L/ 11L/12L	5L/6L/10L/ 11L/12L	5L/10L	5L/10L	5L/10L	5L/10L	5L/10L	5L/10L	5L/6L/10L
默认适用机型	费森尤斯机型		费森尤斯机型	金宝机型		百特机型		日本机型	
A 浓缩液 : B 浓缩液 : 水稀 释混合比例	1 : 1.23 : 32.77		1 : 1.23 : 32.77	1 : 1.83 : 34.00		1 : 1.83 : 34.00		1 : 1.26 : 32.74	

⊙ 血透机可设定不同的“A 浓缩液 : B 浓缩液 : 水”稀释混合比例，在选择血液透析浓缩液时，应根据血透机设定的比例选择产品型号。

血液透析干粉的优点:



品质稳定

- 拥有血液透析干粉独家专利技术
- A 干粉更稳定，不结块发黄，刺激性气味小



优质原料

- 优质原材料，高纯度粉末
- 更少杂质，不容易堵塞滤芯



严格质检

- 严格的出厂检验要求
- 微生物和微粒污染限度要求高于行业标准



安全可靠

- 采用优质材料防漏密封
- 降低运输、存储过程中的泄露风险

血液透析浓缩液的优点



品质保证，有效期长

- 高端先进的检验设备、严谨的检验流程及专业化的检验人员，确保产品质量
- 拥有独家专利技术，B 液有效期长达 12 个月



优质原料，质量上乘

- 采用优质进口原材料生产
- 配制高质量高纯度透析液



自动化生产，安全可靠

- 采用全自动生产流水线，核心工序在十万级洁净车间进行，减少污染环节
- 铝箔封口，避免使用过程中产品被污染



广泛适用，使用方便

- 适用于多种血透机型，多种包装规格
- 无需人工配制，安全便捷

血液透析干粉/浓缩液产品一览表

产品	产品型号	产品规格	默认适用机型	包装
(联机用) 血液透析B干粉	KC2003F1	660g	费森尤斯机型	20支/箱
	KC2003F2	700g	费森尤斯机型	10支/箱
	KC2003F3	1200g		
	KC2003G2	700g	金宝、贝朗等机型	
	KC2003G3	1200g		
血液透析A浓缩液	KC200401	5L/6L/10L/11L/12L	费森尤斯机型	
	KC200401-01	5L/10L	金宝机型 百特机型 日本机型	桶
	KC200402	5L/10L		桶
	KC200403			桶
	KC200405			桶
血液透析B浓缩液	KC200401	5L/6L/10L/11L/12L	费森尤斯机型	桶
	KC200402	5L/10L	金宝机型	桶
	KC200403		百特机型	桶
	KC200405	5L/6L/10L	日本机型	桶

产品	产品型号	产品规格	包装规格(袋/箱)	
血液透析A干粉	KC200101	一人份	1258g	20
		五人份	6290g	4
		十人份	12580g	2
	KC200102	一人份	1022g	20
		五人份	5110g	4
		十人份	10220g	2
	KC200104	一人份	1313 g	20
		五人份	6565g	4
		十人份	13130g	2
血液透析B干粉	KC200101	一人份	540 g	40
		五人份	2700g	8
		十人份	5400g	4
	KC200102	一人份	845 g	30
		五人份	4225g	6
		十人份	8450g	3
	KC200104	一人份	500g	40
		五人份	2500g	8
		十人份	5000g	4

康盛生物血透浓缩物生产基地



全自动血透浓缩物生产线
十万级洁净生产车间
高标准质量检验中心



先进的全自动生产线

- 行业领先的全自动化血液透析浓缩物大规模生产线
- 实现从吹塑成型、配料、灌装、码垛出仓等流程全自动化操作
- 为更多患者提供高品质的血液透析产品



高标准质量检验中心

- 配备微生物限度室、无菌检查室等专业化实验室
- 配备高效液相色谱仪、离子色谱仪、影像测量仪、微粒分析仪、电脑伺服拉力强度试验机先进质检设备
- 全方位检测，为产品质量保驾护航

