

**Medtronic**

Engineering the extraordinary



# Palindrome™ Precision H Chronic Catheter

血液透析用中心静脉导管




## 更少因血栓导致的导管失功

- Palindrome™ Precision H 肝素涂层技术**  
 截面三明治结构  
 肝素涂层透析导管有助于减少血栓的形成  
 长时间冲刷后肝素仍保持活性

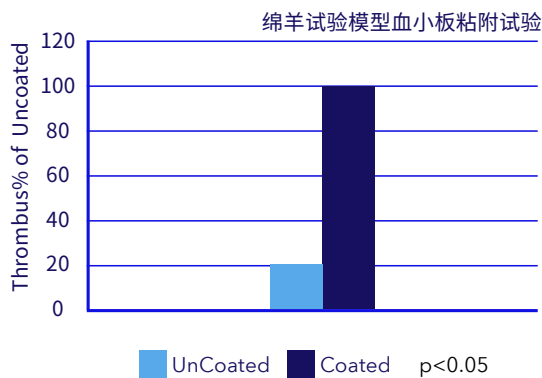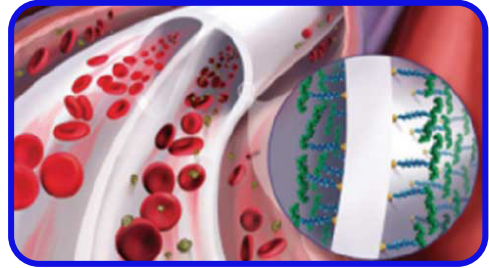

试验应用6只绵羊每只分别置入涂层和非涂层插管进行模拟透析24天对导管外表面提取的血栓进行重量分析


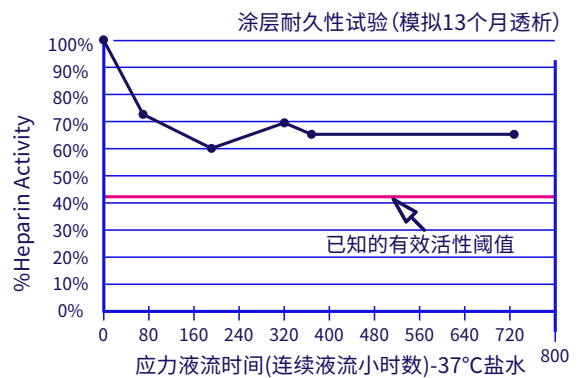


试验应用37°C盐水720小时连续灌注导管以模拟透析,对涂层耐久性进行评价

## H 更高的透析效率

即使是在不得不反接血路的情况下, Palindrome™ Precision H 仍能提供足够的透析效率

- 优化的Z型螺旋对称管尖**  
 无论正接反接, 都有较低的再循环率

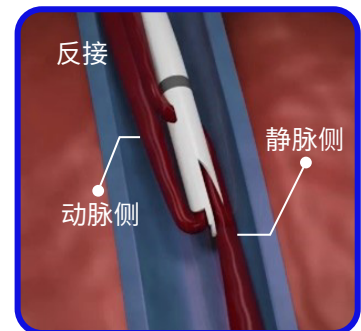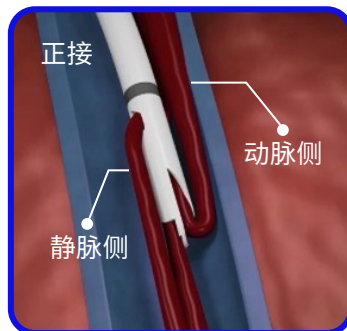

## 更便利的术中操作



Palindrome™ Precision H 的特色手术配件  
助力术者更易完成置管手术

- **安全阀撕脱鞘**  
有效减少术中出血，  
降低气栓的可能
- **VenaTrac™内芯支架**  
免撕脱鞘快速置管  
改良的管尖设计让导管置入更容易，  
减少对患者的损伤



## 独特设计应对临床需求

- **不透射线标记带**  
有助于更准确地判断管尖及侧槽置入位置，  
减少早期置管失败率

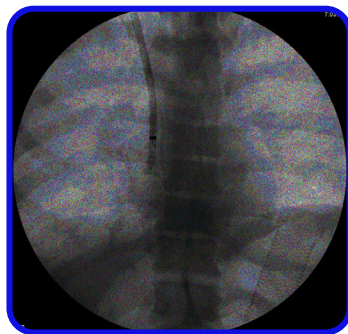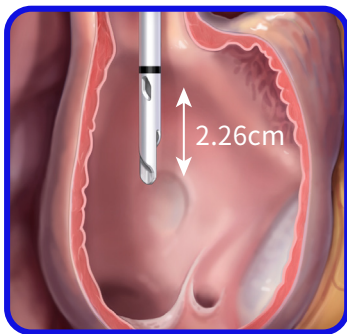

## 订货信息

	规格型号	卡夫管尖长度	导管全长
<b>Pal Precision H</b> 标准型 含肝素涂层和内芯支架	8888145043P	19cm	36cm
	8888145044P	23cm	40cm
	8888145045P	28cm	45cm
	8888145046P	33cm	50cm

**适用范围:**适用于急性和慢性血液透析、血浆置换和液体输注。