

CX-9000

全自动凝血分析仪

迈瑞新一代凝血系列产品开山之作




CX-9000是迈瑞在定频恒速光测平台基础上倾力打造的全新一代凝血产品。在设备外观、软件操作及工作流交互上斩获2021iF设计大奖，为凝血检测提供划时代的解决方案。

CX-9000通过独创的定频恒速技术、多模态即热技术、试剂空中加油技术，实现了对样本TAT管理效率突破性提升；通过独创的联杯密闭液体试剂、智慧全面的信息管理系统，实现了对试剂性能、成本精益化管理。



产品组合模块化管理的平台

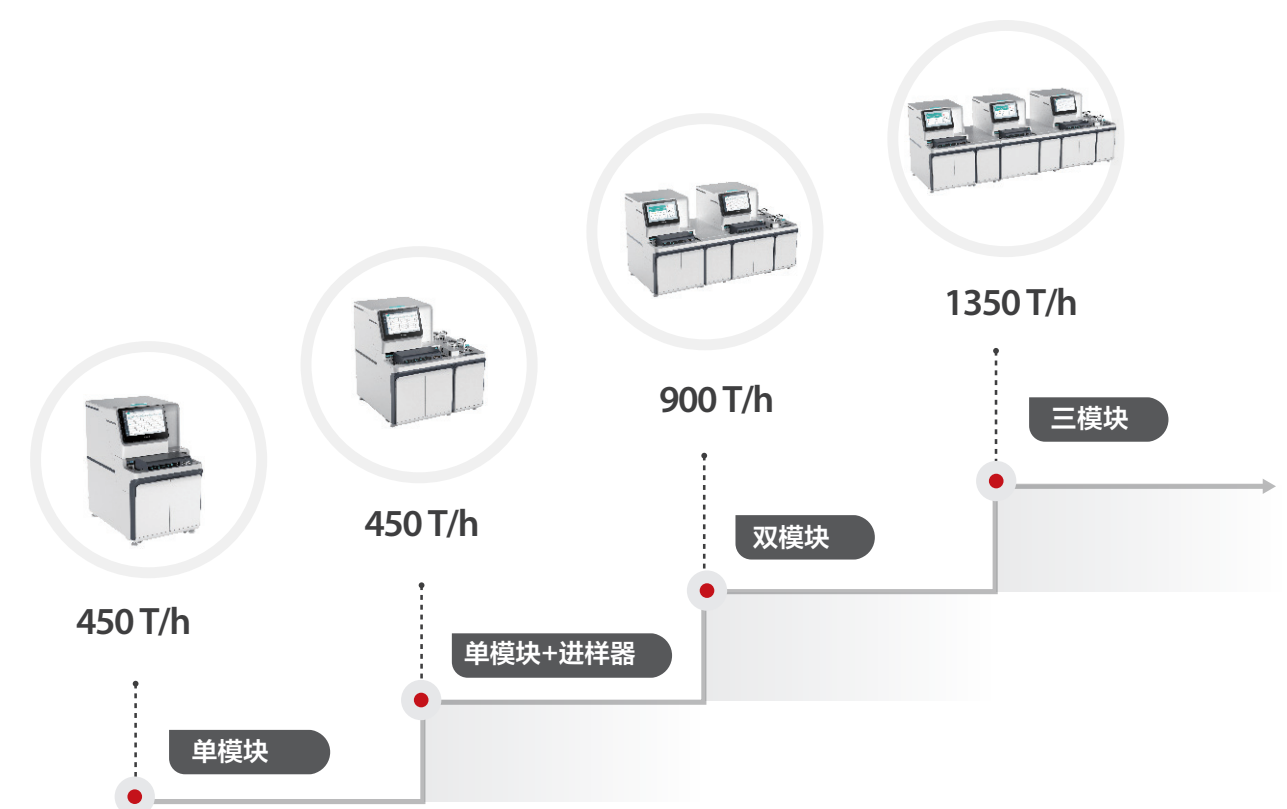

本产品及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容请详见产品实物及相关资料。未经授权不得复制或传播，任何单位和个人不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

CX-9000

全自动凝血分析仪

技术描述

分析原理

- 凝固法
- 发色底物法
- 免疫比浊法

分析方法

- 终点法（阈值法，导数法）
- 固定时间法（两点法）
- 动力学法（速率法）
- 融合法（两点法速率法结合的独创分析法）

样本系统

- 提篮进样模块、机前进样区、急诊进样区，三种方式灵活选用
- 长寿命穿刺针，支持一吸多测
- 样本复检专用缓冲区，智能多档自动选择稀释功能

样本质量核查

- 样本量预检功能，自定义体积核查的范围，核查结果超范围提醒
- 微小凝块检测功能
- 定量分析溶血、黄疸、脂血（HIL）指数
- 预检分析专用池

试剂系统

- 一体化联杯液体试剂盒
- 独立装载盘，自动转运加载
- 试剂加载量智能预估
- 低温封闭式试剂盘，双圈独立运行，24小时不间断2℃~8℃冷藏
- 专用废联杯试剂桶，用尽自动丢弃

反应杯

- 倾倒式随时加载
- 双层废杯盒，支持实时交替处理，不中断检测

创新应用

- HIL指数关联检测项目，后续分析仪内自动化处理流程
- APTT纠正试验全自动解决创新方案
- 反应曲线实时监测、结果逻辑判断、反射测试



迈瑞医疗官方微信 客服中心官方微信

客服热线 400 700 5652
www.mindray.com

P/N:CHN-CX-9000-210285X6P-20220124

本产品及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容请详见产品实物及相关资料。未经授权不得复制或传播，任何单位和个人不得以任何形式复制、引用、分发或转载。产品规格如有变化，恕不另行通知，请以最新技术资料及检验结果为准。

©2023 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司版权所有

CX-9000

全自动凝血分析仪

恒速从容 智选奇剂



样本TAT高效管理的新方式 **恒速有方**




恒
450速



450高恒速

- 8秒1结果，连续输出
- 恒定输出450测试/小时
- 任意组合450测试/小时

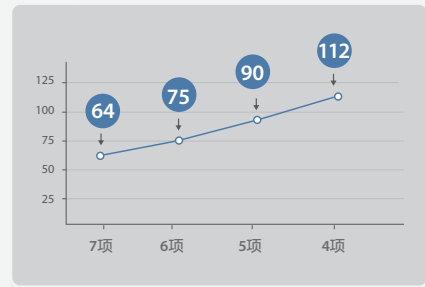

七项不降速

- 全项目真高速
- 七项64样本/小时
- 五项90样本/小时



换试剂不降速

- 独立自感自适装载区，即放即走
- 穿插式转运，30秒内自动完成装载
- 自动丢弃废试剂联杯


临床价值标准化管理的新系统 **价值创新**



创
新应用




CX-9000
全自动凝血分析仪

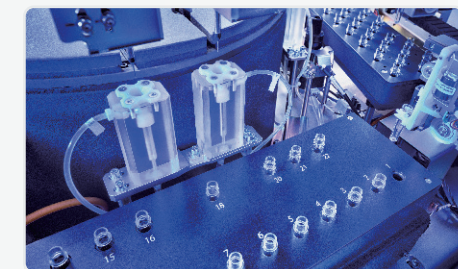

APTT纠正7步全自动

- 血浆机内孵育2小时，检测流程自动化
- 遵循专家共识，结果报告标准化
- 指数自动计算，自动判断是否纠正

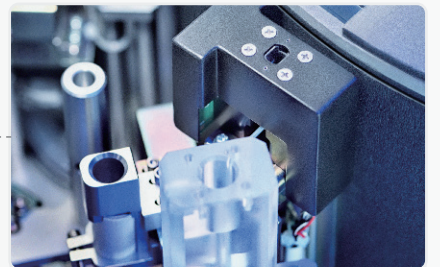

HIL九宫格技术


- 独立预检池，HIL 10级指数结果
- 预置HIL影响项目检测阈值
- 波长切换+机内稀释，HIL样本全自动解决方案



研究型疾病曲线特征库

- 疾病曲线特征参数数据库
- 特征参数比对规则自定义
- 日常反应曲线与特征库进行逐一比对
- 依比对项综合评分，参考及判断研究型临床信息

试剂效能精益管理的新形式 **超稳足量**

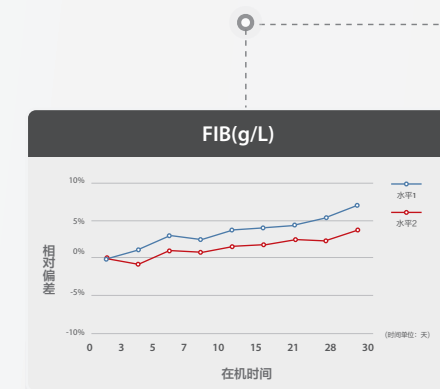

在机稳定超2周

- 一体化联杯试剂，防挥十字封
- 关机试剂盘单独制冷，2-8℃冷藏



真实测试量

- 按人份试剂注册，宣称多少实测多少
- 单联杯射频识别
- 信息全流程跟踪及溯源



全液体一撕即用

- 七项全液体试剂
- 一次性封口易撕膜



稳
超2周